

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GMed 4342 VILÁGÍTÓ JÁRÓBOT



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.


### 1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

A járóbot személyes mozgást segítő eszköz. Mindenki számára javasolt, aki könnyíteni szeretne a járásán. Botjaink biztonságos kialakítása, stabil támaszt nyújthatnak kültéri és beltéri használatkor egyaránt. Baleset vagy betegség következtében ajánlott lehet a járóbot használata, azok számára, akiknek az alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. Javasolt azok számára, akik alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladásától szenvednek. Gyermekekori fejlődési rendellenesség, bénulás következtében kialakult nehézkes járás esetén is segítség lehet. Használata javasolt balesetet vagy műtétet követő rehabilitációs időszak alatt (pl. alsó végtag protézisálása; a járás nehézkessé vált emiatt segítségre szorul; a végtag amputációja esetén). Fizikai gyengeség, vagy egyensúlyzavar, illetve mozgáskoordinációs problémák esetén is azonnali megoldást nyújthat.

### 2. INDIKÁCIÓ

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézisálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

### 3. MŰSZAKI ADATOK

Váz:	<ul style="list-style-type: none"><li>a váz könnyített alumínium ötvözetből készült</li><li>2 szekcióból áll egymásba csúsztatott cső alkotja, a cső átmérője 22 mm, csővastagság 1mm</li><li>rozsdamentes felület</li><li>elérhető szín: fekete alapon csigavonalban felfutó ezüst csíkkal</li></ul>
Markolat:	<ul style="list-style-type: none"><li>az ergonomikusan kialakított, műanyagból (polipropilén) formára öntött T-alakú markolat könnyed fogásd biztosít</li><li>széles kialakításának köszönhetően még görcsös ujjakkal is egyszerűen megmarkolható</li><li>markolatba épített LED fénnel</li><li>csuklópánttal ellátott</li><li>érdesített puha tenyértámasszal, bütykökkel ellátva az ujjak kényelmes megtámaszkodásra szolgál</li></ul>
Rögzítőgyűrű:	<ul style="list-style-type: none"><li>műanyag</li><li>acél rögzítő csappal ellátott</li></ul>
Botvég: 	<ul style="list-style-type: none"><li>gumiból készült cserélhető botvég</li><li>mérete 18 mm</li><li>fekete színű</li><li>a gumivég 1 pontban érinti az földet az egyensúly és mozgás érdekében, illetve elősegítheti a könnyű sétát bármilyen felületen</li><li>csúszásgátló gumi felülete hozzátapad a pl. a járda felületéhez, ezáltal jobb stabilitást biztosíthat</li><li>cserélhető, ha a gyakori használat során elhasználódik</li></ul>

### 4. A TERMÉK HASZNÁLATA

Az első használat előtt a járóbot magasságát be kell állítani a felhasználó magasságának és testsúlyának megfelelően. A járóbot magassága akkor megfelelő, ha használat közben a markolat csípő-csukló magasságban van.

A járóbot magassága 72-90 cm között állítható be, amelyet a következő képpen kell elvégezni:

- A magasság állítása előtt a rögzítő gyűrűt oldja meg.
- Az állítócső helyzetét, a felső cső, illetve az állítócső sugár irányú furatába helyezett, rugós rögzítő gombok használatával lehet beállítani.
- Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik. Győződjön meg róla, hogy a csőre pattintható műanyag fejbe ágyazott acél rögzítő csap megfelelően bepattant-e a helyére.
- Miután beállította a megfelelő magasságot, mindig szorítsa meg a rögzítő gyűrűt.

A járóbotot mindig a stabilabb oldali kézben tartsuk. Lépéskor helyezzük előre, majd a gyengébb lábbal lépünk.





Az elkopott botvég gumit könnyedén tudja cserélni vagy pótolni. A gumik kopása esetén nem szükséges a teljes terméket lecserélni, mivel a botvég gumik külön is megvásárolhatóak a termék forgalmazójánál.


A maximális terhelhetőség, amit a járóbot elbírnak 90 kg. A bot saját tömege 0,3 kg.


**LED fény:** A fény felkapcsolásához nyomja meg a gombot a markolaton. Megvilágíthatja vele az utat. A fény lekapcsolásához nyomja meg a gombot a markolaton újra.

**Elemcsere:** Fordítsa el a markolaton lévő tetőt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem nyílik és helyezze be az elemet. Fordítsa el a tetejét az óramutató járásának irányába addig, amíg nem szorul. A világítást 2 db AA elem biztosítja (az elem nem tartozék).

 Ha a gumivég elkopott, akkor nem fog tapadni és könnyen megcsúszhat. Ellenőrizze rendszeresen és cserélje ki, ha elhasználódott!

 A termék használata során törekedni kell arra, hogy a helyesen kialakított mozdulatok a begyakorlás által automatikussá váljanak, és a mindennapi mozgást megkönnyítsék!

 Csapadéktól nedves felületen közlekedjen óvatosabban! Kisebb és lassabb lépésekkel mozogjon a járóbottal, mivel a nedves, vizes felületen fokozottan nagy a baleset veszélye!

 A járóbot elsősorban hosszirányú terhelés felvételére alkalmas, ezért kerülni kell a járóbot nem rendeltetésszerű terhelését! A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezelésből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

### 5. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A járóbot a háztartásokban használt nem agresszív hatású tisztítószerekkel tisztítható. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

### 6. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni a botvég gumik kopását, elhasználódás esetén cserélni kell.

## 7. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



### GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

**Patella-96 Kft.**

2045 Törökbálint

Kisfaludy u 49-1.

[www.gmed.hu](http://www.gmed.hu)

[www.gyogybolt.hu](http://www.gyogybolt.hu)

[www.epapucs.hu](http://www.epapucs.hu)

E-mail: [info@patellamedical.hu](mailto:info@patellamedical.hu)

Tel.: +36 30 320 0632



### DISTRIBUTOR

**SC Vital Logistic Srl.**

540210 Tirgu Mures

Str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter, Romania

[www.vital-logistic.ro](http://www.vital-logistic.ro)

E-mail: [comenzi@vital-logistic.ro](mailto:comenzi@vital-logistic.ro)

Tel.: +40 265 265 268

## 8. VONALKÓD



**Reklamáció esetén  
kapcsolatfelvétel:**

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

**TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL**

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezettől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 2 vagy 3 év az eladási ártól függően. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) és a megfelelő üzemben tartás is,
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Kicserelésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó másik igény teljesítését nem kéri. A fogyasztó akkor is kérheti a kicserélést, ha a javítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserelési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a fogyasztó nem kéri másik igény teljesítését.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicsereléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 24 hónap jótállást vállal, a 2. § (1) értelmében 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. botvéggumik...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén is érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén  
kapcsolatfelvétel:

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

Kiszolgáltató neve és címe:

Termék megnevezése:

GMED 4342 VILÁGÍTÓ JÁRÓBOT

Termék gyártási száma: (amennyiben van)

Gyártó/Vállalkozás neve és címe:

Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1., reklamacio@patellamedical.hu

Vásárlás időpontja:

A termék vételára:

A termék fogyasztó részére való **átadásának\*** vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi)az **üzembe helyezés\*** időpontja:

\* a megfelelő aláhúzendó

P.H.:

Javító szolgálat neve, címe, elérhetősége:

## JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

## KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: