

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM 4310 EGYENES KAPASZKODÓ



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

A kapaszkodók elősegíthetik a biztonságos környezet kialakítását. Az egyenes kapaszkodók elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó fülke, fürdőkád, WC) végzett tevékenység biztonságosabbá tételét szolgálhatja. Azok számára jelenthet segítséget, akiknek a tisztálkodás során a fürdőkádba történő be-és kilépés, valamint a leülés és felállás nehézséget okoz. Biztonságossá teszi a kádban való felállást, ki-be szállást, valamint a zuhanyzást. A kádban tartózkodáskor stabil kapaszkodási lehetőséget biztosít az eszköz, így használatával csökkenthető egy megcsúszásból eredő baleset kockázata. A házi betegápolásban, illetve szociális és egészségügyi intézményekben történő ellátásban egyaránt alkalmazható.

2. INDIKÁCIÓ

Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyensúlyzavarban szenvedők számára jelenthet segítséget.

3. FELÍRÁSRA JOGOSULT ORVOSOK MEGHATÁROZÁSA

ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat.

4. MŰSZAKI ADATOK

Anyaga rozsdamentes acél cső, fényes felületű fehér színben

Méreték: elérhető 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm hosszúságban

Átmérő 25,4 mm x vastagság 1,2 mm

A faltól való távolság: 70 mm

Termék súlya (mérettől függően): 0,5-1,1 kg

Maximális terhelés: 90 kg

Tartozékok: A felszereléshez és rögzítéshez szükséges tiplik és csavar a csomag része

5. A TERMÉK HASZNÁLATA

A GM 4310 keretét a kád oldalára kell rögzíteni a mellékelt tiplik és csavarok segítségével. A kapaszkodót 6db M5x50-es csavarral és a mellékelt tiplik segítségével rögzítjük a falba. 3-3 db csavarral rögzítse a kapaszkodó mind a két végét a falhoz, a csavarokat a furatokba illetve. Az alkalmazás helyétől függően falra rögzíthető vízszintes, illetve függőleges helyzetben is.



A termék megfelelő rögzítése nagyon fontos! Csak olyan falazathoz rögzíthető, ahol a kapaszkodás során biztonságosan terhelhető. Vályogfalra nem szerelhető!



A falazat jellegének megfelelően más tiplit kell választani gipszkarton vagy porózus anyagú falaknál.



A fürdőkád kapaszkodó csak a hosszirányú keresztmetszetre merőlegesen és függőlegesen terhelhető!

Verziószám: GM 4310-2021/12/15_2.

6. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

Fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerrel tisztítható. A háztartásokban használt nem agresszív, fertőtlenítő, semleges hatású tisztítószerrel tisztítható.

7. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni, hogy a rögzített eszköz nem lazult-e ki!



GYÁTRÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 30 320 0635
info@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu



8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

9. VONALKÓD



30 cm

5 999542 973192



40 cm

5 999542 979613



50 cm

5 999542 979620



60 cm

5 999542 979637



70 cm

5 999542 979644



80 cm

5 999542 979651



90 cm

5 999542 979668



100 cm

5 999542 979675

**Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:**

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezettől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 2 vagy 3 év az eladási ártól függően. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyeztetni üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) és a megfelelő üzemben tartás is,
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Kicserelésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó másik igény teljesítését nem kéri. A fogyasztó akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserelési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a fogyasztó nem kéri másik igény teljesítését.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicsereléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 24 hónap jótállást vállal, a 2. § (1) értelmében 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. műanyag rögzítő..) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettségét.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén is érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

Kiszolgáló neve és címe: Termék megnevezése:

GM 4310 Kapaszkodó

Termék gyártási száma: (amennyiben van) Gyártó/Vállalkozás neve és címe:

Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1., reklamacio@patellamedical.hu

Vásárlás időpontja: A termék vételára: A termék fogyasztó részére való **átadásának*** vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi)az **üzembe helyezés*** időpontja:

* a megfelelő aláhúzendó

P.H.: **Javító szolgálat neve, címe, elérhetősége:****JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!**Ajótállási igény bejelentésének időpontja: Javításra átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje: **KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!**Kicserélés történt, amelynek időpontja:

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE GM 4310 MÂNER DE SUSȚINERE DREPT



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare. Această descriere conține instrucțiuni pentru utilizarea dispozitivului.



1. UTILIZARE GENERALĂ

Mânerul de susținere poate contribui la crearea unui mediu sigur. Mânerile de susținere drepte pot fi folosite pentru a face activitățile mai sigure, în special în zonele umede și alunecoase (băi, cabine de duș, căzi de baie, toalete). Îi poate ajuta pe cei care au dificultăți în a intra și a ieși din baie, în a se așeza și a se ridica în picioare atunci când se spală. Acesta permite ca ridicarea în picioare în cadă, intrarea în și ieșirea din cadă, precum și faptul de a face un duș să fie sigure. Dispozitivul asigură o aderență stabilă în timp ce persoana se află în baie, reducând riscul de accidente cauzate de alunecare. Poate fi utilizat atât în îngrijirea la domiciliu, cât și în instituțiile de asistență socială și medicală.

2. INDICAȚII

Acesta poate ajuta persoanele cu deficiențe de mobilitate permanentă și persoanele cu probleme de echilibru.

3. DOMENIUL MEDICILOR AUTORIZAȚI PENTRU PRESCRIȚIE

traumatologie ortopedică, ortopedie, traumatologie, medicină fizică și medicină de reabilitare, reumatologie, chirurgie, chirurgie pediatrică, geriatrie, medicină infantilă și pediatrică.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Fabricat din tub din oțel inoxidabil cu finisaj lucios de culoare albă
Dimensiuni: disponibil cu lungime de 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm
Diametru 25,4 mm x grosime 1,2 mm
Distanța față de perete: 70 mm
Greutate produs (în funcție de dimensiune): 0,5-1,1 kg
Capacitate maximă de încărcare: 90 kg
Accesorii: Diblurile și șurubul pentru montare și fixare sunt incluse în pachet

5. UTILIZAREA PRODUSULUI

Cadrul GM 4310 trebuie să fie fixat pe partea laterală a băii cu ajutorul diblurilor și șuruburilor furnizate. Mânerul de susținere este fixată pe perete cu 6 șuruburi M5x50 și cu diblurile furnizate. Folosiți câte 3 șuruburi pentru a fixa ambele capete ale mânerului la perete, introducând șuruburile în găuri. În funcție de aplicație, acesta poate fi montat pe perete în poziție orizontală sau verticală.



Fixarea corectă a produsului este foarte importantă! Acesta poate fi fixat pe zidărie numai acolo unde poate fi încărcat în siguranță în timpul prinderii. Nu poate fi montat pe un perete din chirpic!



În funcție de tipul de zidărie, pentru pereții din gips-carton sau pereții poroși trebuie ales un alt tip de dibluri.



Mânerul de susținere pentru ieșirea din cadă poate fi montată numai perpendicular pe secțiunea transversală longitudinală și pe verticală!

Număr versiune: GM 4310-2021/12/15_2.

6. CURĂȚAREA PRODUSULUI

Poate fi curățat cu un dezinfectant de uz casnic. Poate fi curățat cu detergenți neutri, dezinfectanți și non-agresivi utilizați în gospodărie.

7. ÎNȚREȚINEREA PRODUSULUI

Produsul nu necesită întreținere, dar merită să verificați periodic dacă dispozitivul de fixare nu s-a desprins!

8. PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR



PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 30 320 0635
info@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu



DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

9. COD DE BARE



10. GARANȚIE

Vă rugăm să păstrați cu atenție acest prospect, care servește drept titlu de garanție, deoarece orice defecte pot fi remediate numai la prezentarea acestuia. Înlocuirea titlului de garanție este posibilă numai prin prezentarea facturii originale. Întreținerea și curățarea periodică a dispozitivului este responsabilitatea proprietarului. Numai dispozitivele curățate vor fi acceptate pentru reparații. Garanția nu acoperă deteriorarea care nu se datorează unor defecte de fabricație și uzura pieselor din plastic (elementul de șezut și picioare din cauciuc).

11. CERTIFICAT DE GARANȚIE

014-104 Rev 0

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni

PRODUS: SERIA:

FACTURA/BON: DIN DATA:

CUMPĂRĂTOR:

ADRESA:.....

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit în baza legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produselor este de 12 luni de la data cumpărării, perioadă în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care se constată un defect de fabricație. La cumpărarea produsului consumatorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și stampilarea de către vânzător. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 15 de zile.

În cazul defectării produsului, cumpărătorul îl va duce la magazinul de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este însoțit de certificatul de garanție, bonul fiscal și cutia cu care a fost cumpărat, completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și stampilate. Nu se acordă garanție amortizoarelor de cauciuc (consumabile).

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și până la repunerea acestuia în funcțiune.

Cumpărătorul își pierde dreptul la garanție dacă: produsul a fost transportat, depozitat manipulat sau utilizat necorespunzător, dacă a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor.

Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, precum și actele necesare: bonul fiscal și certificatul de garanție.

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 de luni.

Denumire vânzător.....

Adresa vânzător

Tel.vanzator.....

Semnătura și
stampila vânzător

.....

Semnătura și
stampila distribuitor

.....

Semnătura
cumpărător

.....

