



GMed SZILIKONOS SAROKÉK

100% szilikon



A sarkon lévő csontnyúlvány, valamint a láb hátsó részének fájdalma és egyéb rendellenesség esetén.

A terhelés
98%-át
elnyelheti



Méret

● S ● M ● L ● XL

Tartalma: 1 pár

Minőség és technológia az Ön egészségéért!

SZILIKONOS SAROKÉK

100% szilikon



Az oldalsó peremei és sarokformája segítségével tökéletes anatómiai illeszkedést biztosít a lábnak. Ugy tervezték, hogy hatását a sarok hátsó részétől fejtse ki, nagy érintkezési felületet lefedve, fokozott hatékonyságot biztosítva a sarok rendellenességeinek kezelésére és azok megelőzésére.

A sarkon lévő csontnyúlvány, zúzódások, csonttritkulás, ütődés csökkentésére, Achilles-íngyulladás, lábközéptáji fájdalom, talpi fascia gyulladás, rándulások esetén alkalmazható. Kényelmes viseletet biztosít. Javasolt sportolóknak, különösen tornászoknak. Alakja a tökéletes anatómia illeszkedést segíti elő. Kialakítása révén hatását a sarok és a láb hátsó részének egészén kifejti.

HASZNÁLATA: Bármilyen cipőben használható.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A sarokék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a sarokéket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetésszerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához nincs szükség hintóporra.

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.

ÖSSZETÉTEL: 100% szilikon

A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Éles eszközöktől távol tartandó!

ELÉRHETŐ MÉRETEK: S, M, L, XL

 **patella**

Patella-96 Kft.
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu
info@patellamedical.hu
Tel.: +36-1-248-5300



