

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GM FELNŐTT NADRÁGPELENKA

 Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

Termékek:

- GM felnőtt nadrágpelenka nappali S (1180 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka nappali S (1200 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka éjszakai S (1940 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka éjszakai S (2100 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka nappali M (1785ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka nappali M (1800 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka éjszakai M (2720ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka éjszakai M (2800 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka nappali L (1960 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka nappali L (2000 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka éjszakai L (3410 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka éjszakai L (3500ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka nappali XL (1980 ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka nappali XL (2000ml)
- GM felnőtt nadrágpelenka éjszakai XL (3520 ml)
- GM Felnőtt nadrágpelenka éjszakai XL (3730ml)

Az egyszer használatos, nedvszívó felnőtt nadrágpelenka vizelet- és székletinkontinenciával élő személyek inkontinencia ellátására szolgáló orvostechnikai eszköz. A termék rendeltetése a vizelet és széklet felfogása és megtartása, ezáltal a test és a ruházat szennyeződésének megelőzése, illetve csökkentése. A pelenka egyszeri használatra szolgál.

Indikáció:

A termék középsúlyos és súlyos vizelet- és/vagy székletinkontinencia esetén javallt. Azon személyek számára alkalmazható, akik vizelet- és/vagy székletürítésük kontrollálására részben, vagy teljesen képtelenek.

Használat:

1. A megfelelő méret és nedvszívó képesség kiválasztása a felhasználó testalkata és az inkontinencia mértéke alapján.
2. Fordítsa a beteget az oldalára! Teljesen hajtsa szét a pelenkát és hajtsa ki a tépőzárát!

3. Fordítsa vissza a beteget a hátára, hogy a megfelelő helyzetben feküdjön a pelenkán! Hajtsa fel a pelenka alsó részét a beteg lábai között, a hasára!
4. Először rögzítse az alsó, majd a felső tépőzárát!
5. Ellenőrizze, hogy a pelenka kellően illeszkedik-e a testhez, ezzel megakadályozva a szivárgást!
6. Szennyeződés vagy átnedvesedés esetén a pelenkát cserélje ki. A pelenka telítettségének megállapítását a nedvességjelző csík színváltozása segíti.
7. Használat után dobja ki a terméket! A használt pelenkát ne húzza le a WC-n!
8. A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

Bőrirritáció, kipirosodás vagy egyéb nem kívánt bőrtünet jelentkezése esetén a termék használatát fel kell függeszteni, és szükség esetén egészségügyi szakemberhez kell fordulni.

Száraz, hűvös helyen tárolandó. Közvetlen napfénytől és nedvességtől óvja. Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag külsőleges használatra! Nem steril termék!



GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
reklamacio@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.epapucs.hu

Ha a termék használata során bármilyen rendellenességet vagy súlyos eseményt észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze a gyártónak.

