

210.0 mm



Használati útmutató

GMed Prémium talpbetét



Rugalmas, perforált borítású prémium minőségű talpbetét haránt- és hosszboltozat emeléssel. A rugalmas járófelület magas komfortérzetet biztosít és perforált kiképzése segíti a láb szellőzését. A haránt- hosszboltozat emelése segít megelőzni a lúdtalp kialakulását, vagy a már kialakult lúdtalpat kezeli, kiképzése által megemelve a boltozatokat az anatómiai helyes magasságba. A szilárd, de rugalmas alj elősegíti a stabilitást és kontrollálja a mozgást.

Utcai vagy sportcipőben természetes körülmények között viselhető. Azoknál, akiknél a boltozatok lesüllyedésének kellemetlen tünetei már korábban jelentkeztek, az első napokban, hetekben kifejezetten kellemetlen, akár fájdalmas is lehet a betét viselése, ezért javasolt a viselési idő fokozatos növelése.

Előnye a vékony kialakítás, ennek ellenére stabil emelést biztosít!

Használata: Vegye ki az eredeti betétet a cipőjéből! Amennyiben nincsen kivethető betét, győződjön meg arról, hogy nincs beépített boltozatemelés a cipőben. Igazítsa be a betétet a cipő sarokrészéhez igazítva.

Tisztítása: Enyhén nedves, mosószeres ruhával tisztítsa meg a betét perforált felső részét, majd száraz ronggyal törölje át. Ne tegye ki sugárzó hő hatásának!

Kihordási idő: A vásárlástól számított 1 év.



Gyártó: Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.
www.patella.hu, www.gyogybolt.hu, www.gmed.hu
info@patella.hu
+36 1 248 5300



Vonalkódok:

35		36		37	
38		39		40	
41		42		43	
44		45		46	

Verziószám: GMed Prémium Talpbetét-2021/12/17

297.0 mm