



 **patella**



# GMed

## SZILIKONOS LÁBUJJ TARÉJ

*100% szilikon*

Csökkenti a nyomást a lábujjhegyeken és a lábközépcsont fejrészen



**Méret** ● S ● M ● L ● XL

Tartalma: 1 pár

*Minőség és technológia az Ön egészségéért!*



# SZILIKONOS LÁBUJJ TARÉJ

100% szilikon

Segít enyhíteni a lábujjvégekre és a lábközépcsontra nehezedő nyomást, megtámasztja és korrigálja a kalapácsujjakat. A lábujjak alsó felén fejt ki hatását, azáltal, hogy megtámasztja és elősegíti a visszamozdulásukat a normál pozíciójukba. Elősegíti a kalapácsujjakban jelentkező gyulladás enyhítését, és hozzájárul a bőrkeményedések kialakulásának megelőzéséhez.

**HASZNÁLATA:** Helyezze el úgy a második lábujjra (a nagy lábujj felől a kislábujj felé számolva), hogy a lábujj taréj vége még a kislábujját is elérje.

**ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK:** A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetészerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

**TISZTÍTÁS:** Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához nincs szükség hintőporra.

**TÁROLÁS:** Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.

**ÖSSZETÉTEL:** 100% szilikon

A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Éles eszközöktől távol tartandó!

**ELÉRHETŐ MÉRETEK:** S, M, L, XL

 **patella**

 **Patella-96 Kft.**  
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.  
[www.gmed.hu](http://www.gmed.hu)  
[www.gyogybolt.hu](http://www.gyogybolt.hu)  
[www.epapucs.hu](http://www.epapucs.hu)  
[info@patellamedical.hu](mailto:info@patellamedical.hu)  
Tel.: +36-1-248-5300

