

 patella



 **GMed**

# LÁBUJJJELVÁLASZTÓ

*100% szilikon*

Megfelelő az ujjközök védelmére és kényelmet biztosít.



**Méret**

○ S ○ M ○ L



**Tartalma: 1 pár**

*Minőség és technológia az Ön egészségéért!*



# LÁBUJJELVÁLASZTÓ

100% szilikon



Alkalmas a kényelem elősegítésére, használható a lábujjak közti súrlódás és nyomás megszüntetésére. Alakja és anatómiai kialakítása megfelelő arra, hogy védje az ujjközi hegeket és a bőrkeményedéseket. Használható az egymáson fekvő lábujjak elhelyezkedésének kiegyenesítésére. Használata: Lábujjak közti használatra!

**ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK:** A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetészerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

**TISZTÍTÁS:** Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához nincs szükség hintőporra.

**TÁROLÁS:** Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában. Éles eszközöktől távol tartandó!

*A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától!*

**ÖSSZETÉTEL:** 100% szilikon

**ELÉRHETŐ MÉRETEK:** S, M, L

 **patella**



**Patella-96 Kft.**

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

[www.gmed.hu](http://www.gmed.hu)

[www.gyogybolt.hu](http://www.gyogybolt.hu)

[www.epapucs.hu](http://www.epapucs.hu)

[info@patellamedical.hu](mailto:info@patellamedical.hu)

Tel.: +36-1-248-5300

