




 patella



GMed

**SZILIKONOS
SAROKÉK,
DÖNTÖTT**

100% szilikon

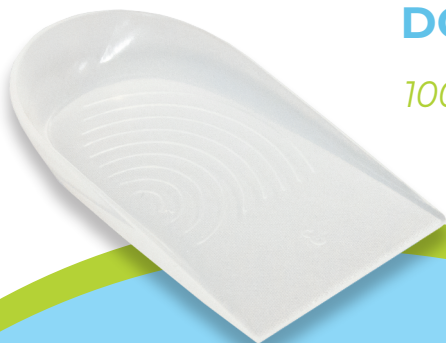

Méret


● S ● M ● L ● XL

Tartalma: 1 pár

Minőség és technológia az Ön egészségéért!



SZILIKONOS SAROKÉK, DÖNTÖTT

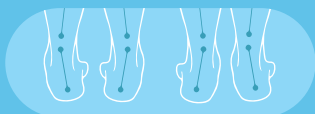

szupináció

pronáció

100% szilikon



Elősegíti a sarok normál helyzetbe állását, és kényelmes viseletet biztosít. Alkalmas azoknak, akik pronációban (befelé forduló) vagy szupinációban (kifelé forduló) szenvednek. Segíti a testtartás javulását, és alkalmas a csontrendszer elmozdulásának megakadályozására. Elősegíti a járás közben a lábat ért ütődések csillapítását.

HASZNÁLATA: A láb állásának korrekciójára használható, szupináció vagy pronáció esetén. Bokasüllyedés esetén a betét vastag oldalát a sarok belső oldala alá kell helyezni. Kifelé fordult láb esetén a betét vastag oldalát a sarok külső oldala alá.

ÖSSZETÉTEL: 100% szilikon

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A sarokék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a sarokéket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetészerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal! Használatához nincs szükség hintóporra.

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.

A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Éles eszközöktől távol tartandó!

HŐMÉRSÉKLET: 15°C - 30°C

PÁRATARTALOM: 40% - 75%

MÉRET: S, M, L, XL



Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 - 1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

info@patellamedical.hu

Tel.: +36-1-248-5300



