

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### GMed 4344 JÁRÓBOT Anatómiai fogantyúval és teleszkóppal



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

#### 1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

A járóbot személyes mozgást segítő eszköz. Mindenki számára javasolt, aki könnyíteni szeretne a járásán. Botjaink biztonságos kialakítása, stabil támaszt nyújthatnak kültéri és beltéri használatkor egyaránt. Baleset vagy betegség következtében ajánlott lehet a járóbot használata, azok számára, akiknek az alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. Javasolt azok számára, akik alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladásától szenvednek. Gyermekkori fejlődési rendellenesség, bénulás következtében kialakult nehézkes járás esetén is segítség lehet. Használata javasolt balesetet vagy műtétet követő rehabilitációs időszak alatt (pl. alsó végtag protézisbeállítása; a járás nehézkessé vált emiatt segítségre szorul; a végtag amputációja esetén). Fizikai gyengeség, vagy egyensúlyzavar, illetve mozgáskoordinációs problémák esetén is azonnali megoldást nyújthat.

#### 2. INDIKÁCIÓ

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézisbeállítása, postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

#### 3. MŰSZAKI ADATOK

Váz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a váz könnyített alumínium ötvözetből készült</li> <li>2 szekcióból áll egymásba csúsztatott cső alkotja, a cső átmérője 22 mm, csővastagság 1mm</li> <li>rozsdamentes felület</li> <li>anatómiai rendszer van beépítve a tengelybe, amely csökkenti az ízületek, izmok és szalagok ért terhelést</li> </ul>
Markolat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>az ergonomikusan kialakított, műanyagból (polipropilén) formára öntött kialakított speciális alakú markolat stabil támasztékot és járást biztosít széles kialakításának köszönhetően még görcsös ujjakkal is egyszerűen megmarkolható</li> <li>egyedülálló formája miatt természetes módon, kényelmesen illeszkedik a tenyeréhez. A speciálisan kialakított csúszásálló felület lehetővé teszi a felhasználó súlyának egyenletes eloszlását a járóboton</li> <li>Bal/jobb kezes ortopédiai kialakítású markolat</li> </ul>
Rögzítőgyűrű:	<ul style="list-style-type: none"> <li>csuklópánttal ellátott</li> <li>műanyag</li> <li>acél rögzítő csappal ellátott</li> </ul>
Botvég:	<ul style="list-style-type: none"> <li>gumiból készült cserélhető botvég</li> <li>mérete 18 mm</li> <li>fekete színű</li> <li>a gumivég 1 pontban érinti az földet az egyensúly és mozgás érdekében, illetve elősegítheti a könnyű sétát bármilyen felületen</li> <li>csúszásálló gumi felülete hozzátapad a pl. a járda felületéhez, ezáltal jobb stabilitást biztosíthat</li> <li>cserélhető, ha a gyakori használat során elhasználódik</li> </ul>



#### 4. A TERMÉK HASZNÁLATA


Az első használat előtt a járóbot magasságát be kell állítani a felhasználó magasságának és testsúlyának megfelelően. A járóbot magassága akkor megfelelő, ha használat közben a markolat csípő-csukló magasságban van.

A járóbot magassága 70-90 cm között állítható be, amelyet a következő képpen kell elvégezni:

- A magasság állítása előtt a rögzítő gyűrűt oldja meg.
- Az állítócső helyzetét, a felső cső, illetve az állítócső sugár irányú furatába helyezett, rugós rögzítő gombok használatával lehet beállítani.
- Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik. Győződjön meg róla, hogy a csőre pattintható műanyag fejbe ágyazott acél rögzítő csap megfelelően bepattant-e a helyére.
- Miután beállította a megfelelő magasságot, mindig szorítsa meg a rögzítő gyűrűt.

⚠ Kézbevetelkor ügyeljen arra, hogy a GMed 4344 oldalspecifikus, vagyis a test jobb és bal oldalához illeszkedik, nem felcserélhető.

A járóbotot mindig a stabilabb oldali kézben tartsuk. Lépéskor helyezük előre, majd a gyengébb lábbal lépünk.

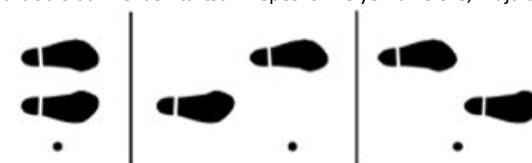

Az elkopott botvég gumit könnyedén tudja cserélni vagy pótolni. A gumik kopása esetén nem szükséges a teljes terméket lecserélni, mivel a botvég gumik külön is megvásárolhatóak a termék forgalmazójánál.

A maximális terhelhetőség, amit a járóbot elbírnak 90 kg.

⚠ Ha a gumivég elkopott, akkor nem fog tapadni és könnyen megcsúszhat. Ellenőrizze rendszeresen és cserélje ki, ha elhasználódott!

⚠ A termék használata során törekedni kell arra, hogy a helyesen kialakított mozdulatok a begyakorlás által automatikussá váljanak, és a mindennapi mozgást megkönnyítsék!

⚠ Csapadéktól nedves felületen közlekedjen óvatosabban! Kisebb és lassabb lépésekkel mozogjon a járóbottal, mivel a nedves, vizes felületen fokozottan nagy a baleset veszélye!

⚠ A járóbot elsősorban hosszirányú terhelés felvételére alkalmas, ezért kerülni kell a járóbot nem rendeltetésszerű terhelését! A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

#### 5. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A járóbot a háztartásokban használt nem agresszív hatású tisztítószerekkel tisztítható. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

#### 6. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni a botvég gumik kopását, elhasználódás esetén cserélni kell.

#### 7. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



**GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ**  
**Patella-96 Kft.**  
2045 Törökbálint  
Kisfaludy u 49-1.  
[www.gmed.hu](http://www.gmed.hu)  
[www.gyogybolt.hu](http://www.gyogybolt.hu)  
[www.epapucs.hu](http://www.epapucs.hu)  
E-mail: [info@patellamedical.hu](mailto:info@patellamedical.hu)  
Tel.: +36 1 248 5300



**DISTRIBUTOR**  
**SC Vital Logistic Srl.**  
540210 Tirgu Mures  
Str Gheorghe Doja nr 177  
Corp C1-C2 Parter, Romania  
[www.vital-logistic.ro](http://www.vital-logistic.ro)  
E-mail: [comenzi@vital-logistic.ro](mailto:comenzi@vital-logistic.ro)  
Tel.: +40 265 265 268

**8. VONALKÓD**

