

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GMED ÁGYASZTAL FIX ASZTALLAPPAL



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. Általános leírás

Betegápolás egyik legfontosabb mozzanata, hogy a betegek megfelelő körülmények között tudják elvégezni napi tevékenységüket. Az ágyasztal az ágyhoz kötött betegek életvitelét segítő eszköz, így kiváló segédeszköznek bizonyulhat a mindennapi tevékenység elvégzéséhez, mint például az étkezés, vagy egyéb fekvés is végezhető feladatok elvégzése esetén. Ágyhoz és székhez is használható, ideális lehet olvasáshoz, íráshoz, laptop használatához is.

2. Összeszerelési útmutató



x2 nagy csavar

x4 kis csavar

x1 nagy csavaranya

x4 kis csavaranya




x1 magasság beállító gomb

x2 fékezhető görgő


x2 görgő

1. Vegye elő az alkatrészeket. Az ágyasztal elemei:

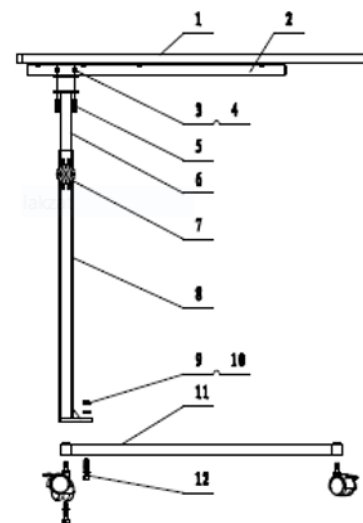

- 1 Asztallap (tálca)
- 2 Támasztó keret
- 3 Csavar
- 4 Összekötő
- 5 Csavar
- 6 Belső cső
- 7 Magasság beállító gomb
- 8 Tartó lábazat
- 9 Önzáró anya
- 10 Összekötő
- 11 „H” alakú alváz
- 12 Csavar
- 13 Elem záró
- 14 Görgős kerék


2. Szerelje össze a részeket a képen jelölt módon és rögzítse csavarokkal.

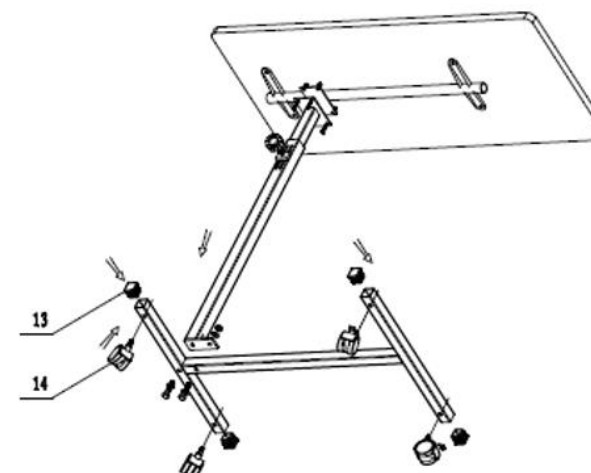


- a) Szerelje a görgőket (14) a „H” alvázra (11). Ügyeljen arra, hogy a 2 fékezhető görgő kerüljön a tartó lábazat alatti oldalra.
- b) Szerelje össze az asztallapot (1) és a belső csövet (6). Rögzítse a 4 darab rövid csavarral, és 4 darab kis csavar anyával.

 **Ellenőrizze az összes tartozék illesztését és szorosságát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az asztal megfelelően van összeszerelve!**

- c) Szerelje össze a „H”alvázat (11) a tartó lábazattal(8). Egy imbuszkulcs segítségével (nem tartozék) a nagy önzáró csavaranyát, és a nagy csavart erősítse a tartó lábazon található második lyukhoz. A megmaradt nagy csavarral rögzítse a tartó oszlopot a „H”alvázhhoz.
- d) Csatlakoztassa az asztal két felét a tartó oszlop belső és külső részének egymásba csúsztatásával, majd fixálja a magasság beállító gombbal (7).


 **Összeszereléskor figyeljen arra, hogy az ágyasztal elengedések a felső része le fog esni, hacsak nincs megtámasztva!**

- e) A tálca szintjének beállításához forgassa el a magasságbeállító gombot (7) az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy az elengedje az ágyasztal alját. Majd húzza a tálcát felfelé, illetve lefelé. A kívánt magasságnál rögzítse a gomb elforgatásával az óramutató járásával megegyező irányban.

 **A magasság állításakor az asztallapot az oszlophoz közeli részen fogja meg! Az ágyasztal maximális ajánlott magassága 95 cm. NE lépje túl ezt a limitet! Nyomja lefelé a tálca közepét, hogy meggyőződhessen arról, hogy a tálca jól rögzült-e.**

 **Az asztallap beállítása közben kérjük, hogy NE érintse meg a fogaskerekeket kézzel vagy más tárgyal!**

3. Termék részei és használata

 **Használat előtt győződjön meg arról, hogy az ágyasztal a leírtak szerint van összeszerelve, és hogy minden alkatrész megfelelően került rögzítésre!**

Váz:

Az ágyasztal könnyű, erős, szürke porfestett acél vázzal kerül forgalomba.

Az alváz mérete: 62cmx40 cm.

Görgők:

Az alváza négy görgő van felszerelve, amelyek lehetővé teszik annak mozgását. Görgők / keret magassága: 5,5 cm. Praktikusán a kerek segítségével egyszerűen arrébb gördíthető, nem kell felemelni.

 **Javasoljuk, hogy minden elemet távolítson el az ágyasztalról, mielőtt azt mozgatná.**

 **Felhasználás előtt ellenőrizze a termék stabilitását, és győződjön meg róla, hogy valamennyi kerék érintkezik-e a talajjal.**


A 4 kerékből 2 fékezhető. Görgők lezárásával és feloldásával lehet az asztalt rögzíteni a kívánt helyen. A fékek alkalmazásához nyomja le a görgők műanyag füleit. A kioldáshoz emelje fel a füleket.

Asztallap:

Az ágyasztal HDF asztallappal kerül forgalomba. Terhelhetősége: 13 kg. Az asztallap magassága állítható 75-95 cm között.

A **fix asztallap** állítható magasságú. Az tálca rendelkezik két hosszanti szélén 1-1 perem található, mely a könyvek, apróbb tárgyak lecsúszását hivatott megakadályozni. Asztallap mérete: 82x40x2 cm

 **NE támaszkodjon az asztallap felfüggesztett végére; mert ez az asztal lecsúszását okozhatja!**

 **Az ágyasztal 13 kg elosztott súly elbírására képes. NE lépje túl ezt a limitet! A maximális stabilitás érdekében mindig próbálja a nehéz tárgyakat az ágyasztal közepének közelében tartani.**

 **Az ágyasztal nem alkalmas arra, hogy rátámaszkodjanak, felálljanak rá, ráüljenek vagy más hasonló teherhordó funkcióra.**

4. Karbantartási és tisztítási útmutató

Rendszeresen ellenőrizze az összes tartozék illesztését és szorosságát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az asztal megfelelően van összeszerelve!

Az asztallap borítása karcálló könnyű tisztán tartani. Ha elszennyeződik óvatosan törölje le az asztalt puha, tiszta, nedves ruhával! Alaposabb tisztításhoz: Tisztítsa meg enyhén szappanos vízzel! Majd az asztalt törölje szárazra tiszta, puha ruhával.

 **NE használjon olyan tisztítószeret vagy forró vizet, amelyek károsíthatják az asztal felületét!**

5. Gyártó és forgalmazó



Gyártó és forgalmazó:

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 1 248 5300
info@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu

Distributor:

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro



6. Vonalkód



5 999542 977497

7. GARANCIA

Ezt a tájékoztató, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges. Az eszköz időszakos karbantartása, tisztítása a Tulajdonos feladata. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át. A műanyag alkatrészek (ülőlap és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására, rongálódására a garancia nem terjed ki.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1,2 vagy 3 év. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezett üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényt csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 12 hónap jótállást vállal. 2. § (1) értelmében 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, és 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén az alábbi telefonszám hívható: +36-30-471-3237

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: Patella-96 Kft. Kisfaludy u. 49-1.

Termék megnevezése: GMed Ágyasztal Fix asztallappal

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

Termék vételára:

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: