

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GMed Párnaemelő



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



### 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÉS

A háttámasz, vagy más néven párnaemelő, segíti a hátgerinc megtámasztását. A hordozható, egyszerűen áthelyezhető háttámla állítható dőlésszöggel kényelmet biztosít olvasáshoz, TV nézéshez. Szolgálhat akár pihenésre, de megkönnyíti a betegnek az írást, vagy tökéletes segítséget nyújt betegágyban fekvő személyek, idősek és mozgáskorlátozottak gondozásában is.

### 2. INDIKÁCIÓ

Elsősorban otthoni használatára, a házi betegápolás megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Használata megkönnyíti az ágyhoz kötött beteg számára az étkezést, és egyéb ágyhoz kötött tevékenységet.

### 3. MŰSZAKI ADATOK

- A váz anyaga könnyű és masszív acél cső. Rozsdamentes és fehér pórszört felülettel.
- Acél vázszerkezeten erős műanyag háló biztosítja a tartósságot és a megfelelő szellőzést.
- A párnaemelőhöz egy tépőzárral rögzített kis szivacs fejpárna is tartozik.
- A beteg igényeinek megfelelően állítható a háttámla dőlésszöge 5 fokozatban, 45° - 75° fokú dőlésszög beállítási lehetőséggel.
- Szállítás előtt vagy használat után egyszerűen összecukható, így könnyedén tárolható.
- A háttámasz légáteresztő anyaggal van ellátva, mely nem akadályozza meg a bőr szellőzését. A felső részen puha párnával van ellátva, mely könnyen eltávolítható.
- Mérete: 60 x 58 cm
- Maximális terhelhetőség: 100 kg

### 4. A TERMÉK HASZNÁLATA



Ne használja a terméket ha azon sérülést, elhasználódást észlel.



Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék elég stabil-e, és hogy a csavarok jól megvannak-e húzva.



A felhasználó tömege ne lépje túl a bot maximális terhelhetőségét, amely 100 kg. A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jóállás nem érvényesíthető!

### 5. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A párnaemelő a háztartásokban használt nem agresszív tisztítószerrel tisztítható. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

### 6. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni az összekötő csavarok feszségét. .

### 7. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



#### GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

**Patella-96 Kft.**  
HU-2045 Törökbálint  
Kisfaludy u 49-1.  
Tel.: +36 1 248 5300  
info@patellamedical.hu  
www.gmed.hu  
www.gyogybolt.hu  
www.epapucs.hu



#### DISTRIBUITOR

**SC Vital Logistic Srl.**  
RO-540210 Tirgu Mures  
str Gheorghe Doja nr 177  
Corp C1-C2 Parter  
comenzi@vital-logistic.ro  
Tel.: +40 265 265 268  
www.vital-logistic.ro

### 8. VONALKÓD



5 9 9 9 5 4 2 9 7 3 2 4 6