


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GMed WC MAGASÍTÓ 11 CM MAGAS, FELHAJTHATÓ KARFÁVAL ÉS FEDŐVEL

 Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. ÁTVÉTEL

Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - lehetőleg az Átadó jelenlétében - győződjön meg arról, hogy a szállítás során esetlegesen nem sérült-e meg! Ellenőrizze, nincs-e látható sérülése a terméknek. Ha bármilyen sérülést lát, vagy hibát gyanít, ne használja a terméket, hanem lépjen kapcsolatba a gyártóval.

2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A betegápolás egyik legfontosabb mozzanata, hogy a betegek megfelelő körülmények között tudják elvégezni alapvető fiziológiai szükségleteiket. Egy nehezen mozgó ember mindennapi teendőinek elvégzése megterhelő lehet megfelelő segédeszközök hiányában. Számukra segítséget nyújthat a már beépített mosdók és WC-k egyszerű átalakítása segédeszközökkel. A laza csatolású toalettülések használatával a WC ülés magassága centiméterekkel növelhető. A rögzítő rendszerek segítségével a magasító biztonságosan és gyorsan rögzíthető a legtöbb típusú WC-csészébe. A legtöbb angol WC csésze formához megfelel. Ajánlott mozgásukban korlátozottak számára, akiknek nehézséget okoz a WC-re való leülés és felállás. A GMed WC magasító használatával, az ülés magasság 11 centiméterrel növelhető.

Indikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint térdízület kopása miatti, vagy csípőtáji törések után fennálló súlyos mozgás beszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.

Kontraindikáció: kognitív rendellenesség, egyensúlyzavarok és ülésre való képtelenség.

3. MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- elülső és hátsó bevágással a könnyebb tisztálkodás érdekében
- a legtöbb standard WC-csészéhez (angol) használható
- a WC magasító anyaga polipropilén műanyag

- 11 cm-el magasítja meg a WC ülőkét
- fedéllel ellátott
- karfái segítik a felhasználót az ülőkére történő felüléskor és leszálláskor
- biztonsági alumínium karfái szükség esetén felhajthatóak és puha habszivaccsal borítottak
- fedéllel ellátott
- maximális terhelhetőség 136 kg

4. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A terméket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja! A GMed WC magasítót a WC-én ülésre tervezték, ezért soha ne használja bármilyen egyéb célra pl. ne használja a terméket létraként, és ne álljon rá!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a rögzítő elem erősen meg van-e húzva! Gondosan ellenőrizze az eszköz alkatrészeinek állapotát! Ha úgy tűnik, hogy valamelyikük nincs megfelelő állapotban, azt eredeti alkatrészszel kell kicserélni.

A karfák segítik a használót az ülőkére történő felüléskor és leszálláskor. Ügyelni kell arra, hogy a felhasználó ne helyezze a karokra a teljes testsúlyát, mivel ez az egység sérülését okozhatja!

A karfák felhajthatóak, a könnyebb használat érdekében.

Maximálisan 136 kg-al terhelje az eszközt! Ne lépje túl a súlykorlátot!

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmazható, ne használja kültéren, és ne tárolja a szabadban! Használat előtt ellenőrizze, hogy a WC amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e! Fali rögzítésű csészénél figyeljen a csésze terhelhetőségére!

Ügyeljen arra, hogy a magasító biztonságosan illeszkedjen a WC csészébe!

Az eszköznek szappan és tusfürdő mentesnek kell lennie a csúszásveszély elkerülése érdekében!

Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a külső sérüléseket! Ne használja, ha sérült!

Ne tegye ki az eszközt 85 Celsius foknál magasabb hőmérsékletnek!

Ne engedje, hogy gyerekek játszanak vele! A gyártó a termékfelelősség körében sem felel olyan veszély- és károkozásért, melyek felügyelet nélküli gyermekekkel történhetnek a termék használati kapcsolatán.

5. FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. A használatba vétel előtt bizonyosodjon meg a termék sérülésmentességéről.
2. Óvatosan vegye le a meglévő WC ülőkét és a fedelet a WC csészéről.
3. A karok felhelyezéséhez a kartámaszt helyezze a WC ülőke hátsó részén lévő oldalsó nyílásban, illessze be és húzza meg a kartámasz és az emelt WC ülőke közötti csavart. Ismétlje meg ugyanezt a másik kartámasszal is. Győződjön meg, hogy a helyére került a rögzítés! A karfák eltávolítását fordított sorrendben végezze.
4. Óvatosan helyezze az ülőkét a WC csészébe. Igazítsa a WC ülőkét a WC csésze pereméhez, ügyelve arra, hogy az elülső szájrész a csészén kívül legyen.
5. Ellenőrizze, hogy az elülső beállító támaszték biztosítja a WC ülőke biztonságos illeszkedését.

6. Állítsa be az emelt ülőke 3 határolóját a WC ülőkéjéhez. Rögzítéshez fordítsa el a kézi kereket az órajárással megegyezően!



7. Használat előtt ellenőrizze a stabilitást!
8. Levételkor egyszerűen lazítsa ki a kézikereket és megemelve vegye le a WC ülőkét. A magasítót felfelé, függőlegesen irányban kell eltávolítani!



Nem megfelelő használat miatti törések esetén a garancia nem érvényes!

6. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A műanyag részekről a szennyeződés háztartási tisztítószerrel eltávolítható. A tisztító folyadék PH értéke 6-8 között legyen (enyhén savanyú- enyhén lúgos) pl. szappanos vízzel. Kerülje a súroló szerek alkalmazását, és vegye figyelembe a tisztítószer tájékoztatóját is!

Csak hagyományos szereket alkalmazzon a fertőtlenítéshez, tisztításhoz, ne pedig maró- és oldó hatású anyagokat!

Amennyiben hővel szeretné fertőtleníteni az ülőkét, akkor az alábbi három hőmérséklet és időtartam alkalmazható:

- 90 C fokos hőmérséklet 1 percig
- 85 C fokos hőmérséklet 3 percig.
- 80 C fokos hőmérséklet 10 percig



Rendszeresen végezze el a termék biztonsági ellenőrzését, ha bármilyen aggálya lenne.

7. VONALKÓD



8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



Gyártó és forgalmazó:

Patella-96 Kft.

HU-2045 Törökbálint

Kisfaludy u 49-1.

Tel.: +36 1 248 5300

info@patellamedical.hu

www.patella.hu

www.gyogybolt.hu

www.gmed.hu



Distributor:

SC Vital Logistic Srl.

RO-540210 Tirgu Mures

str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter

comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265 265 268

www.vital-logistic.ro

9. GARANCIA

Ezt a tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges. Az eszköz időszakos karbantartása, tisztítása a Tulajdonos feladata. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át. A műanyag alkatrészek (ülőlap és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására, rongálódására a garancia nem terjed ki

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezettől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyeztetni üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó

érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 12 hónap jótállást vállal. 2. § (1) értelmében 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, és 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén az alábbi telefonszám hívható: +36-27-504-131, 06-30-442-8088

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.

Termék megnevezése: **GMed WC MAGASÍTÓ**

Típus *: **11 cm magas, felhajtható karfa és fedő**

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való *átadásának* vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az *üzembe helyezés** időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: