

HU Rendeltetése, javallat, leírás:

A GMed-C3 habzivacs alapanyagú, fehér pamut anyaggal bevont Schanz gallér. Használata nyaki gerincfájdalom enyhítésére, valamint nyaki gerincsérülés esetén ajánlott. A gallér segíti a nyak megtámasztását és tehermentesítését. Tépőzárral rögzíthető.

RO Indicație, descriere:

Orteza cervicala din spuma GMed-C3 este un guler Schanz acoperit cu bumbac alb. Este recomandat pentru ameliorarea durerilor de coloana cervicala si pentru leziunile maduvei cervicale. Gulerul ajută la susținerea și ușurarea gâtului. Poate fi prins cu velcro.

Megfelelő méret a nyak körmérete alapján választható! /Mărimea potrivită este data de circumferința gâtului!

(Magassága = inaltime, Hossza = lungime)

	S	M	L	XL
Magassága	8 cm	9 cm	10 cm	10 cm
Hossza	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm

HU Használat, felvétel:

A segédeszközt szakember segítségével vegye használatba! Az eszköz íve a mellkas felőli oldalon, az áll vonalát követve lefelé nézzen! Rögzítse magán a Schanz gallért a tépőzár segítségével úgy, hogy megfelelő feszséget érjen el! A segédeszköz állapotát időnként szakemberrel ellenőriztesse! Ha bármi probléma merülne fel, forduljon a szaküzlethez!

RO instructiuni de folosire:

Utilizare: Curbura ortezei trebuie să fie orientat în jos pe partea pieptului, urmând linia bărbiei! Asigurați gulerul Schanz cu velcro, astfel încât să fie strans corespunzător.

HU Összetétel:

Pamut, poliészter

RO Compoziție:

Bumbac, poliester

HU Tisztítási útmutató:

Mosás előtt a tépőzárát be kell csukni. Mosógépben centrifugálni, vagy szárítógépben szárítani tilos! Közvetlen hőtől távol, természetes úton kell szárítani.

RO Curatare:

Velcro trebuie închis înainte de spălare. Nu centrifugați în mașina de spălat și nu uscați! Trebuie uscat în mod natural, departe de căldură directă.

HU

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

RO

Eventualele reclamații se transmit distribuitorului sau Autoritatea competentă din România: ANMDM – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România.

Gyártó és forgalmazó:

Patella – 96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

Web: www.gmed.hu

Web: www.gyogybolt.hu

Web: www.epapucs.hu

E-mail: info@patellamedical.hu

Tel.: +36 1 248-5300

Distributor:

SC Vital Logistic Srl.

540210 Tirgu Mures

Str Gheorghe Doja nr 177, Corp C1-C2 Parter,

Romania

Web: www.vital-logistic.ro

E-mail: comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265-265-268

MD

CE

VONALKÓDOK/ CODURI DE BARE

S	M	L	XL
 5 999542 970412	 5 999542 972416	 5 999542 973413	 5 999542 973406