

„PANDA”CSECSEMŐMÉRLEG

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVE



Joinwe Technology Co Ltd.
7th FL Bldg 6 road 1 Shangxue Scientific Industrial Park, Bantian
Town Shenzhen, China

Forgalmazza: Patella-96 Kft 2045 Törökbálint Kisfaludy u 49-1



Elektronikus csecsemőmérleg

Az elektronikus csecsemőmérleget arra tervezték, hogy segítsen Önnek ellenőrizni a baba növekedését, mivel pontosan és megbízhatóan méri, hogy az egyes etetések mennyi tejet szoptott a baba. Az ÖNSÚLY funkció lehetővé teszi Önnek, hogy a babát egy puha ruha vagy törülköző használatával mérje meg. A mérlegnek van egy hasznos SÚLY LEZÁRÓ funkciója, ami lehetővé teszi a súly kijelzését a gyermek kapálózása ellenére is 60 kg-ig és 5g skálaosztással, a mérleg abban is segítséget nyújt, hogy ellenőrizhesse gyermeke fejlődését a súlygyarapodás szempontjából fejlődése minden szakaszában.

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT FELTÉTLENÜL AJÁNLJUK, HOGY OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS FIGYELMEZTETÉSEKET. TARTSA BE AZ

ÚTMUTATÁST, AMIT TARTSON BIZTONSÁGOS HELYEN. JAVASLATOK A HASZNÁLATHOZ:

- Helyezze a mérleget egy lapos és kemény felületre. Puha vagy egyenetlen padló (pl. szőnyegek, linóleum) módosíthatja a súly leolvasást.
- Ha a mérleget tányér nélkül használjuk, akkor mielőtt megjelenik a nulla, a babának párhuzamosan elhelyezett lábbal kell ráállnia a mérlegre, hogy a súly egyenletesen oszoljék el.
- Helyezze a babát a mérlegtálca közepére, hogy a test pontos súlyát mérje.



BE/KI TART EGYSÉG NULLA

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

Csak 4x1.5VAA elemeket használjon. Távolítsa el a mérleg alsó részén lévő elemfedőt. Rakja be az elemeket és tegye vissza az elemfedőt. Ne tegye a használt elemet a háztartási hulladék közé, hanem vigye el egy használt elemgyűjtő tárolóba.

BE/KI FUNKCIÓ GOMBOK

Az **ON/OFF** (Be/ki) gomb kapcsolja be ill. kapcsolja ki a mérleget.

EGYSÉG

Nyomja meg az **UNIT** (Egység) gombot, hogy kiválassza a kívánt mértékegységet: kg, font vagy uncia. A mérleg mérési kapacitása 60 kg / 132 font / 2116 uncia, míg a skála beosztás 5 g / 0.01 font / 0.1 uncia. Miután bekapcsolta a mérleget, a kijelző 0.000 kg-t mutat.

AZ ÖNSÚLY FUNKCIÓ NULLÁVAL

Ha a babát már a tálcára helyezte, használja az önsúly funkciót. Kapcsolja be a mérleget a KI/BE gombbal. A kijelző "8888"-t mutat. Várjon addig, amíg a kijelző "0.000 kg"-ot és a bal alsó részen elhelyezkedő "*" jel megjelenik, ekkor helyezze a törülközőt a felületre. Nyomja meg a **ZERO** (Nulla) gombot és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik "0.000": a mérleg kész a mérésre.

TART (TÖMB SÚLY FUNKCIÓ)

Mivel a baba a mérlegen folyton mozog, a kijelzőn megjelenő súly állandóan változik. Amikor a leolvasási érték viszonylag állandó, akkor nyomja le a **HOLD** (Tart) gombot, s a mérleg automatikusan kiszámítja az átlag súlyt, s amikor a bal alsó részen elhelyezett "#" jel kijelzője villogni kezd, a kijelző a baba súlyát mutatja.

A MÉRLEG HASZNÁLATA TÁLCÁVAL

- Nyomja meg a BE/KI gombot. A kijelző "8888"-t mutat. Várja meg, amíg a kijelző 0.000 kg -t jelez, a mérleg ekkor használatra készen áll.
- A mérési egység kiválasztásához nyomja meg a **UNIT** (Egység) gombot
- Helyezze a tálcat a mérlegre és tegyen rá egy törülközőt.
- Nyomja meg a **ZERO** gombot az önsúly funkció elindítására.
- Helyezze a csecsemőt a tálca közepére és várjon, amíg a kijelző a súlyát mutatja. Amikor a a baloldal alsó részén elhelyezett "*" jel megjelenik, akkor állandó a súly.
- Nyomja meg a **ON/OFF** gombot a mérleg kikapcsolásához, de ha a mérleget nem használják, akkor néhány perc múlva automatikusan is kikapcsol.
- A mérleg használata után kérjük, vegye le a tálcat és törölje le először nedves, majd utána száraz törlővel.

A MÉRLEG HASZNÁLATA TÁLCA NÉLKÜL

- A mérleg tálca nélkül is használható, amikor a baba már tud állni, de a súlya nem éri el a 60 kilót.
- Tegye a mérleget lapos és kemény padlóra.
- Vegye le a tálcat.
- Helyezze be a 4 műanyag dugót.
- Kapcsolja be a mérleget és várjon, amíg a kijelző "0.000"-t mutat. Állítsa a babát a mérlegre.
- A mérleg használata után kérjük, vegye le a tálcat és törölje le először nedves, majd utána száraz törlővel.

KARBANTARTÁS

- Vegye le a berendezésről a csomagolást. Ne hagyja a csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztírol stb.) a gyermek keze ügyében, mert veszélyes lehet. A berendezés tárolásához tartsa meg a csomagolást.
- Óvja mérlegét, mivel ez egy precíziós berendezés. Ezért ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek, ütődéseknek, pornak és közvetlen napsütésnek. Ne dobja le, ne üsse a mérleget.
- Sugárzó hőtől tartsa távol a mérleget.
- Ne ugorjon a mérlegre!
- Nedves ruhával törölje le a felületét.
- Az alját csak puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Sohase használjon tisztításához vegyszert, vagy karcoló tisztítószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a mérlegbe, mivel nem vízálló. Ne hagyja, vagy ne használja a mérleget nagyon nedves környezetben, 85% feletti páratartalom, vízzel vagy más folyadékkal való érintkezés korróziót okoz, így befolyásolhatja a mérleg pontosságát.

A MÉRLEG HASZNÁLATA KÜLÖNBÖZŐ CÉLOKRA

Amikor a gyerek felnőtt, vagy a súlya meghaladja a 60 kilót, akkor a mérleget háztartási célokra használhatja, pl. gyümölcsök, zöldségek vagy egyéb, 60 kg. alatti dolgok mérésére.

SZIMBÓLUMOK

- "LO" jelzi, hogy az elemek nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy működjenek; amikor a tápfeszültség nem elégséges, akkor a "V" jel villogni kezd. A felhasználónak kell kicserélnie az elemeket.
- "O-Ld" jelzi, hogy a súly meghaladja a 60 kilót.
- Amikor megnyomja a **ZERO** gombot, a "™" jelzés villogni fog, az önsúly funkció működésbe lép, amikor a jelzés eltűnik, a "*" jelzés fog megjelenni, és megmarad addig, amíg használatra készen áll, miközben ha nincs rajta súly, akkor a " " fog megjelenni "*" jelzéssel.
- Amikor megnyomja a **HOLD** (Tart) gombot, a "*" jelzés fog felvillanni a kijelzőn.

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési tartomány: 20 g - 60 kg
- Skálaosztás: 5 g
- Elem: 4 X 1,5V „AA”
- Súly egysége: kg-font-uncia
- Túlterhelés jelzése: "O-Ld"
- Alacsony töltöttség jelzése: "LO"
- Maximális tűréshatár: +/-1 % + 1 skálaosztás
- Működési feltételek: +0°C +40°C; RP: 85%
- Tárolási feltételek: -10°C + 60°C; RP: 85%

Figyelem! Olvassa el figyelemmel a használati leírást!

HULLADÉK ELHELYEZÉSE

Az elektromos és elektronikus eszközök szelektív gyűjtésével kapcsolatosan: az eszköz életének végén ne tegye vegyes szilárd háztartási hulladék közé, hanem az Ön lakóhelyéhez közeli speciális hulladékgyűjtő központba vigye be, avagy juttassa vissza a disztribútorhoz, amikor ugyanolyan típusú, azonos funkciókkal ellátott új eszközt vásárol. Figyelem! A használt elektromos és elektronikus eszközök helytelen hulladékkezelése büntetést vonhat maga után.

JÓTÁLLÁSI JEGY



VÁLLALKOZÁS NEVE ÉS CÍME:

Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.

Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:

@ reklamacio@patellamedical.hu

+36-30-471-3237

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 2 vagy 3 év az eladási ártól függően. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezeti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) és a megfelelő üzemben tartás is,
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

• elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Kicserelésnek van helye már az első javítási kísérlet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó másik igény teljesítését nem kéri. A fogyasztó akkor is kérheti a kicserélést, ha a javítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserelési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a fogyasztó nem kéri másik igény teljesítését.

• ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicsereléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másokra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 24 hónap jótállást vállal, a 2. § (1) értelmében 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

Kiszolgáló neve és címe:

Vállalkozás neve és címe: Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1., reklamacio@patellamedical.hu

Termék megnevezése: PANDA Csecsemőmérleg

Termék gyártási száma: (amennyiben van)

Gyártó neve és címe: (amennyiben nem azonos a vállalkozással) Joinwe Technology Co Ltd. 7th FL Bldg 6 road 1 Shangxue Scientific Industrial Park, Bantian Town Shenzhen, China

Vásárlás időpontja:

Termék vételára:

A termék fogyasztó részére való **átadásának*** vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az **üzembe helyezés*** időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

JAVÍTÁS ESETÉNTÖLTENDŐ KII

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

P.H.:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KII Kicserélés történt, amelynek időpontja: