

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GMed 4343 JÁRÓBOT Anatómiai fogantyúval



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

A járóbot személyes mozgást segítő eszköz. Mindenki számára javasolt, aki könnyíteni szeretne a járásán. Botjaink biztonságos kialakítása, stabil támaszt nyújthatnak kültéri és beltéri használatkor egyaránt. Baleset vagy betegség következtében ajánlott lehet a járóbot használata, azok számára, akiknek az alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. Javasolt azok számára, akik alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladásától szenvednek. Gyermekkori fejlődési rendellenesség, bénulás következtében kialakult nehézkes járás esetén is segítség lehet. Használata javasolt balesetet vagy műtétet követő rehabilitációs időszak alatt (pl. alsó végtag protézisbeültetése; a járás nehézkessé vált emiatt segítségre szorul; a végtag amputációja esetén). Fizikai gyengeség, vagy egyensúlyzavar, illetve mozgáskoordinációs problémák esetén is azonnali megoldást nyújthat.

2. INDIKÁCIÓ

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézisbeültetés postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

3. MŰSZAKI ADATOK

Váz:	<ul style="list-style-type: none"> a váz könnyített alumínium ötvözetből készült 2 szekcióból álló egymásba csúsztatott cső alkotja, a cső átmérője 22 mm, csővastagság 1mm rozsdamentes felület
Markolat:	<ul style="list-style-type: none"> az ergonomikusan kialakított, műanyagból (polipropilén) formára öntött kialakított speciális alakú markolat stabil támasztékot és járást biztosít széles kialakításának köszönhetően még görcsös ujjakkal is egyszerűen megmarkolható egyedülálló formája miatt természetes módon, kényelmesen illeszkedik a tenyeréhez. A speciálisan kialakított csúszásgátló felület lehetővé teszi a felhasználók súlyának egyenletes eloszlását a járóboton Bal/jobbs kezés ortopédiai kialakítású markolat
Rögzítőgyűrű:	<ul style="list-style-type: none"> csuklópánttal ellátott műanyag acél rögzítő csappal ellátott
Botvég:	<ul style="list-style-type: none"> gumiból készült cserélhető botvég mérete 18 mm fekete színű a gumivég 1 pontban érinti az földet az egyensúly és mozgás érdekében, illetve elősegítheti a könnyű sétát bármilyen felületen csúszásgátló gumi felülete hozzátapad a pl. a járda felületéhez, ezáltal jobb stabilitást biztosíthat cserélhető, ha a gyakori használat során elhasználódik



4. A TERMÉK HASZNÁLATA

Az első használat előtt a járóbot magasságát be kell állítani a felhasználó magasságának és testsúlyának megfelelően. A járóbot magassága akkor megfelelő, ha használat közben a markolat csípő-csukló magasságban van.

A járóbot magassága 70-90 cm között állítható be, amelyet a következő képpen kell elvégezni:

- A magasság állítása előtt a rögzítő gyűrűt oldja meg.
- Az állítócső helyzetét, a felső cső, illetve az állítócső sugár irányú furatába helyezett, rugós rögzítő gombok használatával lehet beállítani.
- Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik. Győződjön meg róla, hogy a csőre pattintható műanyag fejbe ágyazott acél rögzítő csap megfelelően bepattant-e a helyére.
- Miután beállította a megfelelő magasságot, mindig szorítsa meg a rögzítő gyűrűt.

Kézbevéttelkor ügyeljen arra, hogy a GMed 4343 oldalspecifikus, vagyis a test jobb és bal oldalához illeszkedik, nem felcserélhető.

A járóbotot mindig a stabilabb oldali kézben tartsuk. Lépéskor helyezzük előre, majd a gyengébb lábbal lépünk.



Az elkopott botvég gumit könnyedén tudja cserélni vagy pótolni. A gumik kopása esetén nem szükséges a teljes terméket lecserélni, mivel a botvég gumik külön is megvásárolhatóak a termék forgalmazójánál.

A maximális terhelhetőség, amit a járóbot elbír 90 kg.

Ha a gumivég elkopott, akkor nem fog tapadni és könnyen megcsúszhat. Ellenőrizze rendszeresen és cserélje ki, ha elhasználódott!

A termék használata során törekedni kell arra, hogy a helyesen kialakított mozdulatok a begyakorlás által automatikussá váljanak, és a mindennapi mozgást megkönnyítsék!

Csapadéktól nedves felületen közlekedjen óvatosabban! Kisebb és lassabb lépésekkel mozogjon a járóbottal, mivel a nedves, vizes felületen fokozottan nagy a baleset veszélye!

A járóbot elsősorban hosszirányú terhelés felvételére alkalmas, ezért kerülni kell a járóbot nem rendeltetészerű terhelését! A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

5. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A járóbot a háztartásokban használt nem agresszív hatású tisztítószerrel tisztítható. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

6. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni a botvég gumik kopását, elhasználódás esetén cserélni kell.

7. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint

Kisfaludy u 49-1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

E-mail: info@patellamedical.hu

Tel.: +36 30 320 0635



DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.

540210 Tirgu Mures

Str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter, Romania

www.vital-logistic.ro

E-mail: comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265 265 268

8. VONALKÓD

Jobb 5



999542

978135

Bal 5



999542

977138

**Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:** reklamacio@patellamedical.hu +36-30-471-3237**TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL**

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezettől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 2 vagy 3 év az eladási ártól függően. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) és a megfelelő üzemben tartás is,
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Kicserelésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó másik igény teljesítését nem kéri. A fogyasztó akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserelési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a fogyasztó nem kéri másik igény teljesítését.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicsereléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időbe az a rész, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 24 hónap jótállást vállal, a 2. § (1) értelmében 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. botvéggumik...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén is érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

Kiszolgáló neve és címe:

Termék megnevezése:

GMED 4343 JÁRÓBOT ANATÓMIAI FOGANTYÚVAL

Termék gyártási száma: (amennyiben van)

Gyártó/Vállalkozás neve és címe:

Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1., reklamacio@patellamedical.hu

Vásárlás időpontja:

A termék vételára:

A termék fogyasztó részére való **átadásának*** vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi)az **üzembe helyezés*** időpontja:

* a megfelelő aláhúzendó

P.H.:

Javító szolgálat neve, címe, elérhetősége:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Ajótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BASTON MEDICAL Gmed 4343 cu mâner anatomic



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare. Această descriere conține instrucțiuni pentru utilizarea dispozitivului.

1. UTILIZARE GENERALĂ

Un baston de mers este un ajutor personal de mobilitate. Este recomandat tuturor celor care doresc să faciliteze mersul pe jos. Bastoanele noastre sunt concepute pentru a fi sigure și pentru a oferi un suport stabil atât pentru utilizarea în interior, cât și în exterior. Din cauza unui accident sau a unei boli, utilizarea unui baston poate fi recomandată pentru cei care au nevoie să își ușureze sarcina asupra membrului inferior și să își asigure siguranța mersului. Recomandat pentru cei care suferă de durere, inflamație cauzate de uzura articulațiilor la nivelul membrelor inferioare. De asemenea, poate ajuta cu dificultăți de mers pe jos din cauza unei tulburări de dezvoltare la copii sau a paraliziei. Utilizarea este recomandată în timpul reabilitării după un accident sau o intervenție chirurgicală (de exemplu, proteza membrului inferior; mersul devine dificil și necesită asistență; amputarea unui membru). Poate oferi o soluție imediată în cazul unei slăbiciuni fizice, a unui dezechilibru sau a unor probleme de coordonare a mișcării.

2. INDICAȚII

Pentru tratamentul durerilor articulare ale membrelor inferioare, inflamații, malformații, paralizii sau slăbiciunea persoanelor vârstnice, tratamentul postoperator sau conservator al leziunilor membrelor inferioare, faza postoperatorie a amputațiilor și protezelor membrelor inferioare, pentru tulburări de echilibru.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Cadru:	<ul style="list-style-type: none"> • cadrul este realizat din aliaj aluminiu ușor • format din 2 secțiuni de tub care alunecă unul în celălalt, cu diametrul tubului de 22 mm, grosimea tubului de 1 mm • suprafață inoxidabilă
Mâner:	<ul style="list-style-type: none"> • mânerul ergonomic, din plastic turnat (polipropilenă), cu formă specială, asigură un suport și o prindere stabile • datorită design-ului său mare, bastonul poate fi ușor apucat și cu degete amorțite. • datorită formei sale unice, se potrivește în mod natural și confortabil în palma dumneavoastră. Suprafața antiderapantă special concepută permite distribuția egală a greutății utilizatorilor pe baston • Mâner stânga/dreapta cu design ortopedic • cu curea de mână
Inel de fixare:	<ul style="list-style-type: none"> • plastic • cu știft de fixare din oțel
Capăt:	<ul style="list-style-type: none"> • capăt înlocuibil din cauciuc • dimensiune 18 mm • de culoarea neagră • amortizorul din cauciuc atinge pământul pe 1 puncte pentru echilibrul și mișcarea facilitând mersul ușor pe orice suprafață • suprafața din cauciuc antiderapant aderă de exemplu la suprafața pavajului, oferind astfel o stabilitate mai bună. • este înlocuibilă dacă devine uzată în timpul utilizării frecvente



4. UTILIZAREA PRODUSULUI

Înainte de prima utilizare, înălțimea bastonului trebuie reglată, în funcție de înălțimea și greutatea utilizatorului. Înălțimea bastonului este adecvată dacă, în timpul utilizării, mânerul este la nivelul încheieturii mâinii și a șoldului.

Înălțimea bastonului se poate regla de la 70 cm până la 90 cm, care trebuie executată după cum urmează:

1. Slăbiți inelul de fixare înainte de a regla înălțimea.
2. Poziția tubului de reglare poate fi reglată folosind butoanele de blocare cu arc introduse în tubul superior sau în orificiul circular al tubului de reglare.
3. Ajustarea tubului de reglare este ajutată de elementele din plastic de pe capetele tubului. Asigurați-vă că știft de fixare din oțel încorporat în capul de din plastic care poate fi prins de țevă, s-a fixat corect în orificiul de blocare.
4. După reglarea înălțimii potrivite, strângeți întotdeauna inelul de fixare.

⚠ Atunci când utilizați, luați în considerare că Gmed 4343 este specific pentru fiecare parte, adică se potrivește pentru partea dreaptă și pentru partea stângă a corpului, nu este interschimbabil.

Țineți întotdeauna bastonul în mână de pe partea mai stabilă. Așezați-l în fața dumneavoastră când mergeți, apoi pășiți cu piciorul mai slab.



Puteți să schimbați cu ușurință sau să înlocuiți cauciucul uzat al capătului de baston. Din cauza uzurii cauciucurilor, nu este necesară înlocuirea întregului produs, deoarece cauciucurile pot fi achiziționate separat de la distribuitorul produsului.

Capacitate maximă de încărcare a bastonului reglabil este 90 kg.

⚠ Dacă amortizorul de cauciuc este uzat, acesta nu se va adera și poate aluneca ușor. Verificați-l regulat și înlocuiți amortizorul din cauciuc dacă este uzat.

⚠ Atunci când utilizați produsul, trebuie să vă străduiți ca mișcările proiectate corect să devină automate prin practică și să faciliteze mișcarea de zi cu zi!

⚠ Mergeți mai atent pe suprafețe umede din cauza precipitațiilor! Deplasați-vă cu pași mai mici și mai încet cu bastonul, deoarece există un risc crescut de accidente pe suprafețele umede!

⚠ Bastonul este potrivit în primul rând pentru susținerea sarcinilor longitudinale, așadar trebuie evitată încărcarea necorespunzătoare a bastonului! Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea, supraîncărcarea, modificarea sau manipularea necorespunzătoare celor prevăzute în instrucțiunile de utilizare, deci în acest caz, garanția este nulă!

5. CURĂȚAREA PRODUSULUI

Bastonul poate fi curățat cu detergenți neutri utilizați în gospodărie. După spălare, clătiți cu multă apă și ștergeți cu o cârpă uscată!

6. ÎNȚREȚINEREA PRODUSULUI

Produsul nu necesită întreținere, se recomandă verificarea periodică a uzurii cauciucului capetelor, iar în caz de uzură trebuie schimbat.

7. PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR

Vă rugăm să rețineți că evenimentele neașteptate cu dispozitivul trebuie raportate producătorului și autorității competente a utilizatorului și / sau a statului membru de stabilire a pacientului. Autoritatea competentă din România: ANMMDM – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România.



PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR

Patella-96 Kft.
 HU-2045 Törökbálint
 Kisfaludy u 49-1.
 Tel.: +36 30 320 0635
 info@patellamedical.hu
 www.gmed.hu
 www.gyogybolt.hu
 www.epapucs.hu



DISTRIBUITOR

SC Vital Logistic Srl.
 RO-540210 Tirgu Mures
 str Gheorghe Doja nr 177
 Corp C1-C2 Parter
 comenzi@vital-logistic.ro
 Tel.: +40 265 265 268
 www.vital-logistic.ro

8. COD DE BARE



9. GARANȚIE

Vă rugăm să păstrați cu atenție acest prospect, care servește drept titlu de garanție, deoarece orice defecte pot fi remediate numai la prezentarea acestuia. Înlocuirea titlului de garanție este posibilă numai prin prezentarea facturii originale. Întreținerea și curățarea periodică a dispozitivului este responsabilitatea Proprietarului. Numai dispozitivele curățate vor fi acceptate pentru reparații. Garanția nu acoperă deteriorarea care nu se datorează unor defecte de fabricație și uzura pieselor din plastic (ex. elementul de șezut sau picioare din cauciuc).

CERTIFICAT DE GARANTIE

014-104 Rev 0

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni

PRODUS: SERIA:

FACTURA/BON: DIN DATA:

CUMPĂRĂTOR:

ADRESA:

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit în baza legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produselor este de 12 luni de la data cumpărării, perioadă în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care se constată un defect de fabricație. La cumpărarea produsului consumatorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și stampilarea de către vânzător. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 15 de zile.

În cazul defectării produsului, cumpărătorul îl va duce la magazinul de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este însoțit de certificatul de garanție, bonul fiscal și cutia cu care a fost cumpărat, completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și ștampilate. Nu se acordă garanție amortizoarelor de cauciuc (consumabile).

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și până la repunerea acestuia în funcțiune.

Cumpărătorul își pierde dreptul la garanție dacă: produsul a fost transportat, depozitat manipulat sau utilizat necorespunzător, dacă a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor.

Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, precum și actele necesare: bonul fiscal și certificatul de garanție.

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 de luni.

Denumire vanzator.....

Adresa vanzator

Tel.vanzator.....

Semnătura și
 ștampila vânzătorului

Semnătura și
 ștampila importatorului

Semnătura
 cumpărătorului

