

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GMed Párnaemelő



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. ÁLTALÁNOS LEÍRÉS

A háttámasz, vagy más néven párnaemelő, segíti a hátgerinc megtámasztását. A hordozható, egyszerűen áthelyezhető háttámla állítható dőlésszöggel kényelmet biztosít olvasáshoz, TV nézéshez. Szolgálhat akár pihenésre, de megkönnyíti a betegnek az írást, vagy tökéletes segítséget nyújt betegágyban fekvő személyek, idősek és mozgáskorlátozottak gondozásában is.

2. INDIKÁCIÓ

Elsősorban otthoni használatára, a házi betegápolás megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Használata megkönnyíti az ágyhoz kötött beteg számára az étkezést, és egyéb ágyhoz kötött tevékenységet.

3. MŰSZAKI ADATOK

- A váz anyaga könnyű és masszív acél cső. Rozsdamentes és fehér pórszört felülettel.
- Acél vázszerkezeten erős műanyag háló biztosítja a tartósságot és a megfelelő szellőzést.
- A párnaemelőhöz egy tépőzárral rögzített kis szivacs fejpárna is tartozik.
- A beteg igényeinek megfelelően állítható a háttámla dőlésszöge 5 fokozatban, 45° - 75° fokú dőlésszög beállítási lehetőséggel.
- Szállítás előtt vagy használat után egyszerűen összecukható, így könnyedén tárolható.
- A háttámasz légáteresztő anyaggal van ellátva, mely nem akadályozza meg a bőr szellőzését. A felső részen puha párnával van ellátva, mely könnyen eltávolítható.
- Mérete: 60 x 58 cm
- Maximális terhelhetőség: 100 kg

4. A TERMÉK HASZNÁLATA



Ne használja a terméket ha azon sérülést, elhasználódást észlel.



Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék elég stabil-e, és hogy a csavarok jól megvannak-e húzva.



A felhasználó tömege ne lépje túl a bot maximális terhelhetőségét, amely 100 kg. A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jóállás nem érvényesíthető!

5. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A párnaemelő a háztartásokban használt nem agresszív tisztítószerrel tisztítható. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

6. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni az összekötő csavarok feszségét. .

7. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 30 320 0635
info@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu



DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

8. VONALKÓD



**Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:**

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 2 vagy 3 év az eladási ártól függően. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) és a megfelelő üzemben tartás is,
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Kicserelésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó másik igény teljesítését nem kéri. A fogyasztó akkor is kérheti a kicserélést, ha a javítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserelési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a fogyasztó nem kéri másik igény teljesítését.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicsereléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 24 hónap jótállást vállal, a 2. § (1) értelmében 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. rögzítők...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén is érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

Kiszolgáló neve és címe:

Termék megnevezése:

GMed Párnaemelő

Termék gyártási száma: (amennyiben van)

Gyártó/Vállalkozás neve és címe:

Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1., reklamacio@patellamedical.hu

Vásárlás időpontja:

A termék vételára:

A termék fogyasztó részére való **átadásának*** vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi)az **üzembe helyezés*** időpontja:

* a megfelelő aláhúzendó

P.H.:

Javító szolgálat neve, címe, elérhetősége:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNĂLȚĂTOR PENTRU PERNĂ GMed

1. DESCRIERE GENERALĂ

Spătarul, cunoscut și sub numele de înălțător pentru pernă, ajută la susținerea coloanei vertebrale. Spătarul portabil, ușor de mutat, cu înclinare reglabilă, oferă confort pentru citit, vizionare TV. Poate fi folosit pentru relaxare, pentru a ușura scrierea pentru pacient sau ca un ajutor perfect pentru persoanele imobilizate la pat, persoanele în vârstă și persoanele cu mobilitate redusă.

2. INDICAȚII

Acesta este destinat în principal utilizării la domiciliu, pentru a facilita îngrijirea la domiciliu, dar poate fi utilizat și în spitale și instituții sociale. Utilizarea acestuia face ca pacientul imobilizat la pat să mănânce mai ușor și să facă alte activități la pat.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

- Materialul cadrului este un tub ușor și solid din oțel. Cu suprafață inoxidabilă și acoperită cu pulbere albă.
- Plasa puternică din plastic pe un cadru din oțel asigură durabilitatea și o aerisire adecvată.
- Înălțătorul pentru pernă vine, de asemenea, cu o mică pernă de cap din burete atașată prin Velcro.
- Unghiul spătarului poate fi reglat în 5 trepte în funcție de nevoile pacientului, cu posibilitatea de a regla unghiul de 45° la 75°.
- Poate fi pliat cu ușurință înainte de transport sau după utilizare, deci poate fi depozitat cu ușurință.
- Spătarul este acoperit cu un material respirabil care permite pielii să respire. Partea superioară este prevăzută cu o pernă moale, ușor de îndepărtat.
- Dimensiune: 60 x 58 cm
- Capacitate maximă de încărcare: 100 kg

4. UTILIZAREA PRODUSULUI



Nu utilizați produsul dacă observați orice deteriorare sau uzură.



Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul este suficient de stabil și că șuruburile sunt strânse.



Greutatea utilizatorului nu poate să depășească capacitatea maximă de încărcare a bastonului, care este de 100 kg. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea, supraîncărcarea, modificarea sau manipularea necorespunzătoare celor prevăzute în instrucțiunile de utilizare, deci în acest caz, garanția este nulă!

5. CURĂȚAREA PRODUSULUI

Înălțătorul pentru pernă poate fi curățat cu detergenți neutri utilizați în gospodării. După spălare, clătiți cu multă apă și ștergeți cu o cârpă uscată!

6. ÎNȚREȚINEREA PRODUSULUI

Produsul nu necesită întreținere, se recomandă verificarea periodică a etanșeității șuruburilor de conectare.

7. PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR



PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 30 320 0635
info@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu



DISTRIBUITOR

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

8. COD DE BARE



9. GARANTIE

TERMEN DE GARANȚIE : 12 LUNI

PRODUS:.....SERIA.....
FACTURA/BON:DIN DATA:.....
CUMPĂRĂTOR:
ADRESA CUMPARATOR:.....

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit în baza legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produselor este de 12 luni de la data cumpărării, perioadă în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care se constată un defect de fabricație.

La cumpărarea produsului consumatorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și stampilarea de către vânzător. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 15 zile.

În cazul defectării produsului, cumpărătorul îl va duce la magazinul (farmacia) de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este însoțit de certificatul de garanție, bonul fiscal și cutia cu care a fost cumpărat, completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și stampilate.

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și pînă la repunerea acestuia în funcțiune.

Cumpărătorul își pierde dreptul la garanție dacă: produsul a fost transportat, depozitat manipulat sau utilizat necorespunzător, dacă produsul a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor.

Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în buna stare, precum și actele necesare: factura sau bonul fiscal și certificatul de garanție.

Durata medie de utilizare a produsului este de 24 luni.

Denumire vanzator.....

Adresa vanzator

Tel.vanzator.....

Semnătura și
stampila vânzătorului

Semnătura
cumpărătorului

.....

.....

Importator/distribuitor:

Vital Logistic Srl

RO28976531

J26/836/2011

Tel.:0265-265268

