

# Használati utasítás

(Felnőtt pelenka)



## Első lépés:

Feküdjön az oldalára a használó, terítse ki a pelenkát és hajtsa fel a tépőzáras oldalt; a pamut magos rész pontosan a derék és a csípő között legyen.

## Második lépés:

Segítsen a kinyújtásában és részét az ágyék fölé. vízfelszívó rész ne



felhasználónak lábait hajtsa fel a pelenka alsó részéig. Ügyeljen, hogy az íves szél jól simuljon ki.



## Harmadik lépés:

Nyissa ki a tépőzárakat, állítsa be a megfelelő helyzetbe, a bal és a jobb oldal legyen szimmetrikus, hogy a pelenka jól illeszkedjen a testhez.

Patella-96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1

**Negyedik lépés:**

Ellenőrizze, hogy a pelenka jól történhessen



nincsenek-e redők a lábaknál és illeszkedik a testhez, hogy ne vizelet kiszivárgás.