



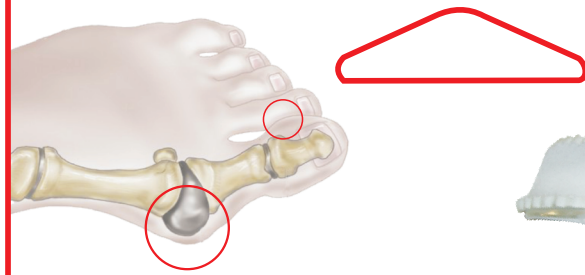

HALLUX VALGUS KEZELŐ

Minőség és technológia az Ön egészségéért!

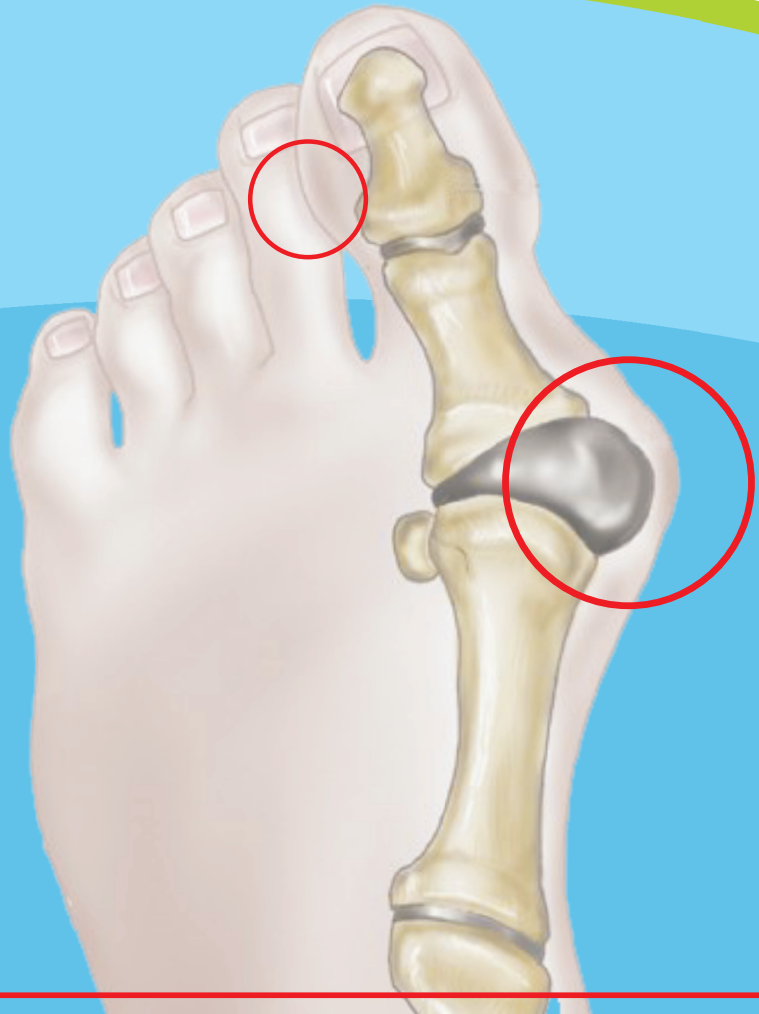

Segít korigálni a bűtyköket és segít megakadályozni a kialakulásukat

HALLUX VALGUS KEZELŐ

A Hallux Valgus éjszakai egyenesítő betét kiváló minőségű anyagokból készült, kényelmes és tartós. Hipoallergén és mosható.

Hallux Valgus rendellenességek (bűtyök), összefonódott és egymást átfedő lábujjak kialakulásának megelőzésére és kezelésére, valamint a műtétek utáni használatra alkalmas. A Hallux Valgus kezelőt hosszabb nyugalmi időszakok alatt történő használatra szánták, például alvás közben vagy bármilyen egyéb hosszabb pihentető tevékenység folyamán, ahol nincs szükség a láb aktivitására.

HASZNÁLATA: Kérjük, az oldalasságot vegye figyelembe. Húzza ki a tépőzárát a termékből úgy, hogy az szabadon maradjon, és csak a tépőzár varrt része maradjon a termékhez rögzítve. Helyezze az első lábujját (nagy lábujját) a homorú rész szájára úgy, hogy a bőrszík takarja a bűtyköt. Tekerje a tépőzárát a lába köré, és húzza meg a kívánt nyomás eléréséhez. Hajtsa vissza a tépőzárát az alapjához, és nyomja meg a rögzítéshez. Az első használatkor a terméket nem szabad 30 percnél tovább használni. Néhány nap használat után a termék egész éjszaka kényelmesen használható lesz. Célszerű a termék használatakor egy vékony zoknit ráhúzni a kezelt lábra, hogy csökkentse a termék súrlódását a lepedőkkel és takarókkal. Fokozatosan növelje a szalag feszességét, mindig úgy, hogy ne okozzon kényelmetlenséget. A terméket csak pihenésre vagy alvásra használja. Ne álljon vagy sétáljon, amikor használja!

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetésszerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

ÖSSZETÉTEL: Akрил, bőr, habszivaccsal ellátott tépőzár

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.

A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Kérjük, konzultáljon orvosával a használat megkezdése előtt. Amennyiben hatástalannak ítéli meg a használatát, kérjük forduljon szakemberhez.

ELÉRHETŐ MÉRETEK: S, M, L



Patella-96 Kft.
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu
info@patellamedical.hu
Tel.: +36-1-248-5300



Korigálja a bűtyköket és segít megakadályozni a kialakulásukat

HALLUX VALGUS KEZELŐ



Segít korigálni a bűtyköket és segít megakadályozni a kialakulásukat

HALLUX VALGUS KEZELŐ

- Tartós
- Hatékony
- Kényelmes

Méret
● S ● M ● L

Tartalma: 1 pár

Javaslat:



HALLUX VALGUS KEZELŐ

A Hallux Valgus éjszakai egyenesítő betét kiváló minőségű anyagokból készült, kényelmes és tartós. Hipoallergén és mosható.